



Инструкция к препарату Сика Кеа противорубцовый пластырь (Cica Care повязка) 12x15 см

[Узнать цену >>>](#)

Состав и форма выпуска

Повязка Сика-Кеа выпускается в индивидуальной стерильной упаковке размером 12см х 15см.

Состоит повязка из силикона.

Показания к применению

Пластырь Сика-Кеа применяется для профилактики и лечения гипертрофических и келлоидных рубцов.

Способ применения

Антирубцовый пластырь нужно носить постоянно, снимая его только для чистки. Первые два дня пластырь носят по 2 часа, потом ежедневно увеличивают время ношения на 2 часа, позволяя коже привыкнуть. Пластырь должен выходить за края рубца на 0,5–1 см. Если рубец по размеру больше, можно брать несколько пластырей – очень важно, чтобы их концы соприкасались, а не соединялись внахлест. На подвижных частях тела и там, где возможно сильное трение с одеждой, пластырь следует фиксировать повязкой. Пластырь CICA-CARE нужно дважды в день мыть с мылом, потом дать высохнуть. Если соблюдать гигиенические нормы, то пластырем можно пользоваться на протяжении трёх недель.

Противопоказания

Продукт CICA-CARE не должен применяться у пациентов с осложненными медицинскими факторами, препятствующими надлежащему применению повязки, а также у пациентов с нарушением целостности кожного покрова. Нельзя накладывать на открытые раны.

Побочные реакции

В редких случаях возможно проявление аллергических реакций в месте аппликации.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C.

Условия продажи

Без рецепта.